



Schicken Sie Ihre Daten zum Arzt!

Eine optimale Diabetes-Therapie setzt voraus, dass der Arzt Ihre Blutzuckerwerte kennt und auch weiß, wann bzw. wieviel Insulin Sie spritzen oder welche Tabletten Sie einnehmen.

>> Aus handschriftlichen Papiertagebüchern kann man solche Infos nur mit viel Mühe ersehen. Oft fehlen dort auch Werte oder sind nicht mehr richtig lesbar.

Viele Ärzte lesen daher die Messgeräte der Patienten in den Computer ein. Dies ist aber oft umständlich und kostet Zeit in der Sprechstunde.

Sinnvoller ist es, die Werte schon vor dem Arztbesuch zu verschicken. Dadurch helfen Sie Ihrem Arzt, Zeit zu sparen und er kann sich besser auf das Gespräch mit Ihnen vorbereiten.

Mit gluconet®, der innovativen Telemedizinlösung für Diabetes-Patienten, geht das ganz einfach, sicher und kostenlos.

Fragen zu gluconet®

Was ist gluconet®?

gluconet® ist eine innovative Telemedizinlösung, speziell für Diabetespatienten. Vom Computer daheim können Sie die Werte aus Ihrem Messgerät direkt zum Arzt senden.

Warum das Ganze?

Viele Ärzte lesen die Messgeräte der Patienten in den Computer ein. Dies ist aber oft umständlich und kostet Zeit. Sinnvoller ist es daher, die Werte schon vor dem Arztbesuch zu übermitteln. Dadurch helfen Sie Ihrem Arzt, Zeit zu sparen und er kann den Termin besser vorbereiten.

Warum ist gluconet® so sicher?

Ausser den verschlüsselten Messwerten wird zur Identifikation nur eine Nummer (gluconet®-ID) übertragen. Es müssen keine persönlichen Daten angegeben werden, nicht einmal eine eMail-Adresse wird benötigt. Selbst wenn jemand es schafft, den Datenversand abzuhören und die Verschlüsselung zu knacken: ein Rückschluß auf Ihre Identität wäre noch immer nicht möglich.

Welches Blutzuckermessgerät kann ich verwenden?

gluconet® unterstützt jedes gängige Blutzuckermessgerät; dazu können Sie auch Daten aus Tagebuch-Apps, aus Insulinpumpen oder Blutdruckmessgeräten schicken. Eine tagesaktuelle Liste finden Sie unter www.gluconet.de

Wirklich kostenfrei?

gluconet® ist für Sie als Patient vollkommen kostenfrei. Sie gehen keine Verpflichtung ein und müssen auch nicht einmal eine eMail-Adresse angeben.


Was wird benötigt?

Sie benötigen nur einen Computer mit Internetanschluss sowie das zum Messgerät passende Datenkabel.

Wer steht dahinter?

gluconet® wird betrieben von mediaspects GmbH, dem europaweit führenden Hersteller von Diabetes-Management Software. Die Software *DIABASS® PRO* wird in vielen tausend Arztpraxen und Kliniken eingesetzt, über hunderttausend Patienten nutzen *DIABASS®* zur täglichen Tagebuchführung.

C008-09122015

gluconet® ist eine Software der mediaspects GmbH, Postfach 100731, D-72307 Balingen 




Telemedizin für Diabetes-Patienten

Schicken Sie Ihre Blutzuckerwerte von daheim aus zum Arzt


- Einfach
- Sicher
- Universell
- Kostenlos



So einfach funktioniert es:

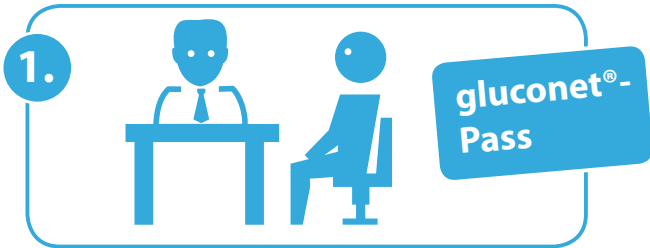

Sie erhalten von Ihrem Arzt einen gluconet®-Pass, der eine kurze Anleitung sowie Ihre persönliche gluconet®-ID enthält – das ist eine Kennziffer, mit welcher die Daten bei Ihrem Arzt zugeordnet werden können.

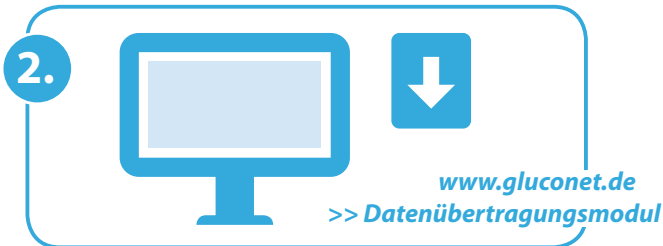

Laden Sie von www.gluconet.de die kostenlose Übertragungssoftware herunter. Es werden dazu keine Daten von Ihnen abgefragt und es ist auch keine Registrierung erforderlich. Anschliessend starten Sie das Programm, geben Ihre gluconet®-ID ein und wählen das gewünschte Messgerät.



Mit wenigen Klicks können Sie die Werte aus allen gängigen Blutzuckermessgeräten, aus Blutdruckmessgeräten sowie aus Insulinpumpen in den Computer einlesen und dann automatisch an den Arzt übertragen. Sie müssen weder eine eMail-Adresse noch sonstige persönliche Daten eingeben.

- >> Selbstverständlich werden die Daten trotzdem noch hochgradig verschlüsselt.
- >> Das Ganze ist für Sie vollkommen **kostenfrei** – Sie benötigen lediglich das Datenübertragungskabel für Ihr Messgerät.
- >> Nach Abschluss der Datenübertragung erhalten Sie ein PDF-Dokument, in dem Ihre Werte übersichtlich als Tagebuch aufbereitet sind. Dieses können Sie dann ausdrucken und abspeichern.



Übrigens: gluconet® kann auch mit Apps genutzt werden.

Wenn Ihre Tagebuch-App zertifiziert für gluconet® ist, dann erfolgt der Datenversand sogar auf Knopfdruck.



Für den Arzt ist der Datenempfang genauso einfach: per Klick werden bereitstehende Daten automatisch abgeholt und dann – lokal, also auf dem PC des Arztes – den Patienten wieder zugeordnet.



So einfach und komfortabel funktioniert gluconet® – überzeugen Sie sich selbst: Unter www.gluconet.de zeigt ein kurzes Video wie einfach, schnell und sicher gluconet funktioniert



Auch möglich: Versenden Sie die Daten aus Tagebuch-Apps