

DIABASS[®] PRO

herstellernertrales Diabetes-Management

Neue Version
verfügbar
ab Sommer 2018



✓ Einfachste Bedienung

✓ Offen & Herstellerunabhängig

✓ Umfassend & Integrativ

✓ Datenschutz & Schweigepflicht

Neue Version
verfügbar
ab Sommer 2018

Weil **ärztliche Unabhängigkeit** und
Datenschutz nicht verhandelbar sind:

DIABASS[®] PRO

herstellerneutrales Diabetes-Management

Einfachste Bedienung

Schnelles Arbeiten ohne überflüssige Klicks – neue Tools wie Zeitleiste, Tabs und Eigenschaftsfenster optimieren den Workflow.

Komplett neue Benutzeroberfläche:
Einfacher Zugriff auf alle Funktionen.



Umfassend & Integrativ

Übersichtliche Auswertungen (neu:
u. a. AGP, Hypo-Analyse, Basalrate...)

Telemedizin leicht gemacht:

Datenübernahme aus Apps,
Konnektivität mit Praxissoftware,
gluconet[®]-Anbindung.



Offen & Herstellerunabhängig

Kompatibel mit allen gängigen
Blutzuckermessgeräten, mit CGM/FGM,
Insulinpumpen und Apps.

Keine Beeinflussung des Verordnungsverhaltens:

DIABASS[®] ist herstellerneutral und für
alle Geräte offen: auch Systeme „kleinerer“
Anbieter werden unterstützt.



Datenschutz & Schweigepflicht

Alle Daten bleiben beim Arzt;
es werden keine Patientendaten
an Hersteller übermittelt.

Ohne die Risiken von Cloud-Lösungen:

Keine gesonderte Einwilligung und kein
Auftragsverarbeitungsvertrag (Art. 28
DSGVO) erforderlich.



Neue Version
verfügbar
ab Sommer 2018

Weil **ärztliche Unabhängigkeit** und **Datenschutz** nicht verhandelbar sind:

DIABASS[®] PRO
Eine Software für alle Messgeräte



DIABASS[®] PRO unterstützt Sie in der digitalen und komfortablen Dokumentation und Auswertung.
Egal, welches Blutzuckermessgerät Ihr Patient nutzt!

Sie benötigen nur eine Software, um die Werte aus allen gängigen Blutzuckermessgeräten, sowie aus zahlreichen Insulinpumpen, CGM und sonstigen Geräten direkt einzulesen. Daten können aus vielen anderen Programmen oder Apps übernommen werden (z. B. von CareLink, mySugr).

DIABASS[®] PRO – wertvolle Hilfe im Klinikalltag

Nicht nur zur Qualitätssicherung: eine umfassende Diabetesdokumentation ist auch im stationären Bereich unabdingbar.

Die komfortable Patientenverwaltung, die Netzwerkfähigkeit, die Unabhängigkeit von Messgeräteherstellern sowie umfassend Analysefunktionen machen **DIABASS[®] PRO** zum universellen Werkzeug im ambulanten oder stationären Bereich.



Neue Version
verfügbar
ab Sommer 2018

DIABASS[®] PRO

Eine Software für alle Messgeräte

DIABASS[®] PRO wurde komplett überarbeitet – zahlreiche Wünsche aus der Praxis sind umgesetzt!

➔ **Einfachere Bedienung**

Die Benutzeroberfläche wurde komplett überarbeitet und kommt in klarem Design

➔ **Zeiträume vergleichen**

Unterschiedliche Zeiträume können nebeneinander oder untereinander dargestellt werden

➔ **CGM und Insulinpumpe**

Zahlreiche neue Darstellungen, u. a. AGP, Tageszeitanalyse, Pumpeneinstellung

➔ **Komfortable Zeitleiste**

Der Auswertungszeitraum kann nun bequem über eine Zeitleiste ausgewählt werden

➔ **Deutlich schneller**

Der Aufbau der Grafiken sowie die Datenübertragung erfolgen deutlich schneller

➔ **Verbesserte Druckausgabe**

Die Druckberichte wurden komplett erneuert und sind noch eingängiger

➔ **Verbindung mit Praxis-Software**

Auswertungen können nun auch an die Praxissoftware zurückgegeben werden (per GDT-Schnittstelle)

➔ **Keine Installation**

Die neue Programmversion ist ohne Installation lauffähig und kann auch von USB-Stick oder CD gestartet werden

➔ **Auskunft und Portabilität (DSGVO)**

Einfache Erstellung einer Datenauskunft für den Patienten (gem. Art. 15 DSGVO) sowie einer strukturierten Datenkopie (gem. Art 20 DSGVO)

Neue Version
verfügbar
ab Sommer 2018


DIABASS[®] PRO

Eine Software für alle Messgeräte

Einfachste Bedienung

Schnelles Arbeiten ohne überflüssige Klicks – neue Tools wie Zeitleiste, Tabs und Eigenschaftsfenster optimieren den Workflow.

Komplett neue Benutzeroberfläche:
Einfacher Zugriff auf alle Funktionen.

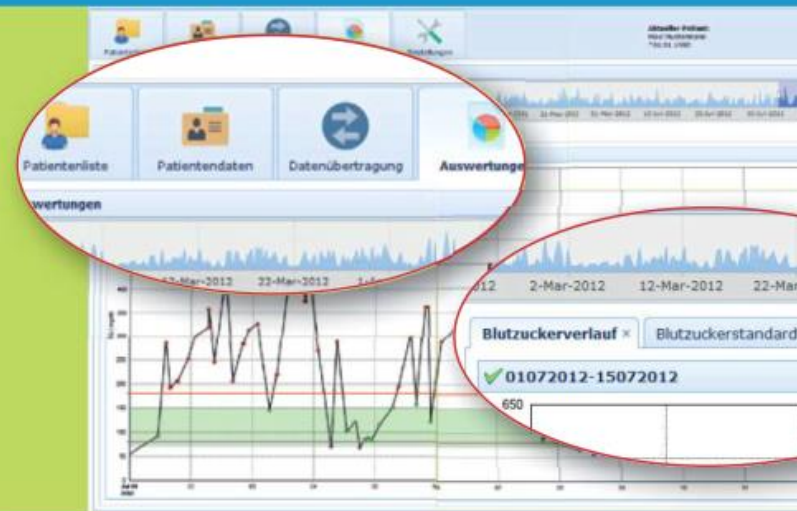

Neue Version
verfügbar
ab Sommer 2018



Alles auf einen Blick

Analyse von Diabetes-Daten mit **DIABASS® PRO**
– einfach und schnell.

Die Funktionen sind nun in Tabellenreitern angeordnet und direkt abrufbar. Dank der ergonomischen Benutzerführung reduziert sich die Einarbeitungszeit auf ein Minimum.

- ✓ **Einfachere Bedienung:** die Benutzeroberfläche wurde komplett überarbeitet und kommt in klarem Design
- ✓ **Bessere Ergonomie:** durch Verzicht auf Schaltflächen werden unnötige Mausklicks vermieden
- ✓ **Komfortable Zeitauswahl:** wählen Sie den Darstellungszeitraum bequem über eine Zeitleiste aus
- ✓ **Individuell anpassbar:** das neue Eigenschaftsfenster erlaubt eine schnelle Anpassung der Grafiken auf Mausklick

Programmfunktionen sind als Karteikarten angeordnet

Mit Hilfe von Tabs ist ein schneller Wechsel zwischen den Ansichten/Funktionen möglich



Auswahl des Auswertungsbereichs per Zeitleiste


Eigenschaftsfenster zum Anpassen der Darstellung

DIABASS® PRO

Eine Software für alle Messgeräte

Neue Version
verfügbar
ab Sommer 2018


DIABASS[®] PRO
Eine Software für alle Messgeräte

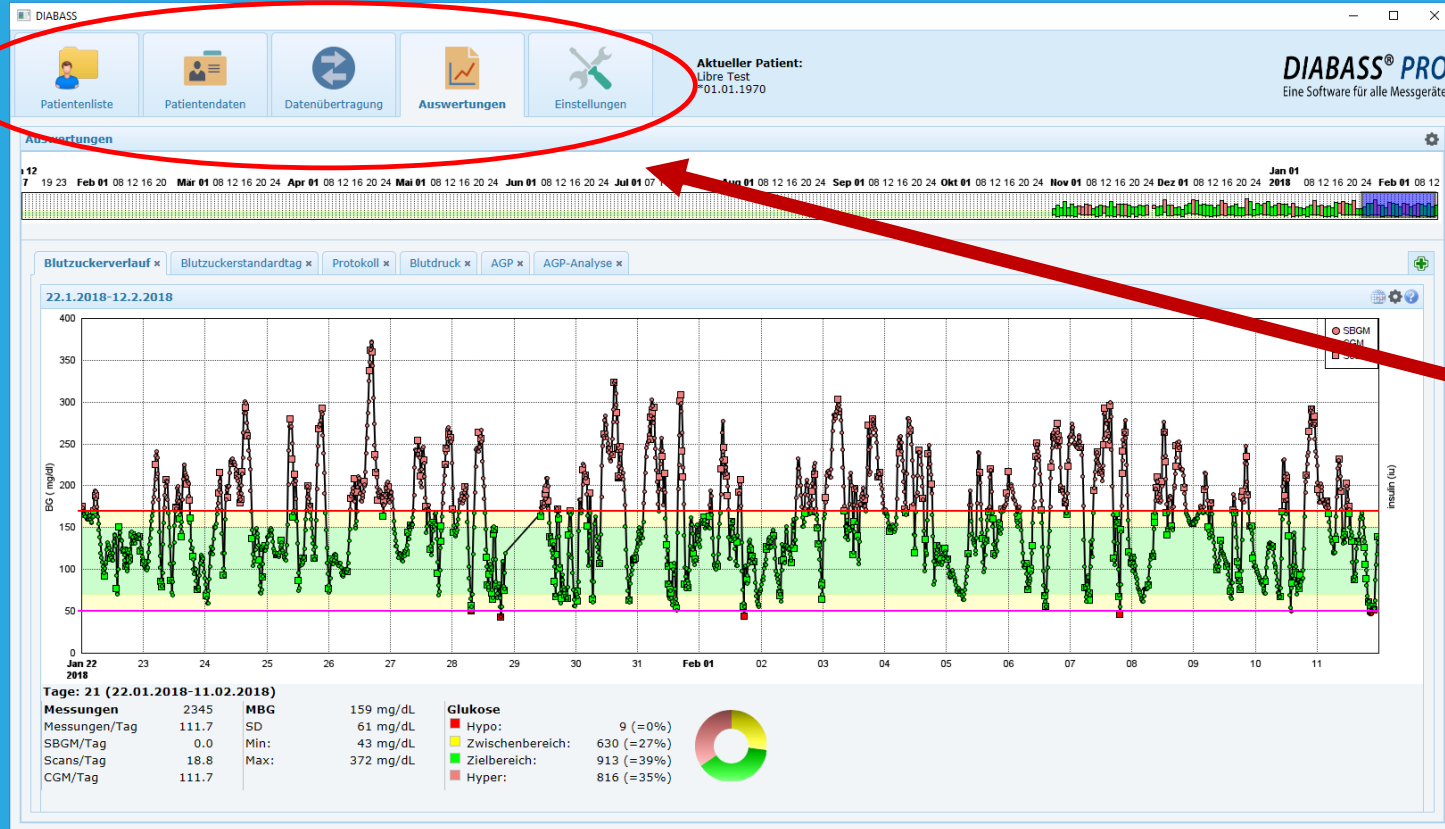

Schnellerer Zugriff
Programmfunktionen sind
als Karteikarten angeordnet

Neue Version
verfügbar
ab Sommer 2018

DIABASS[®] PRO
Eine Software für alle Messgeräte

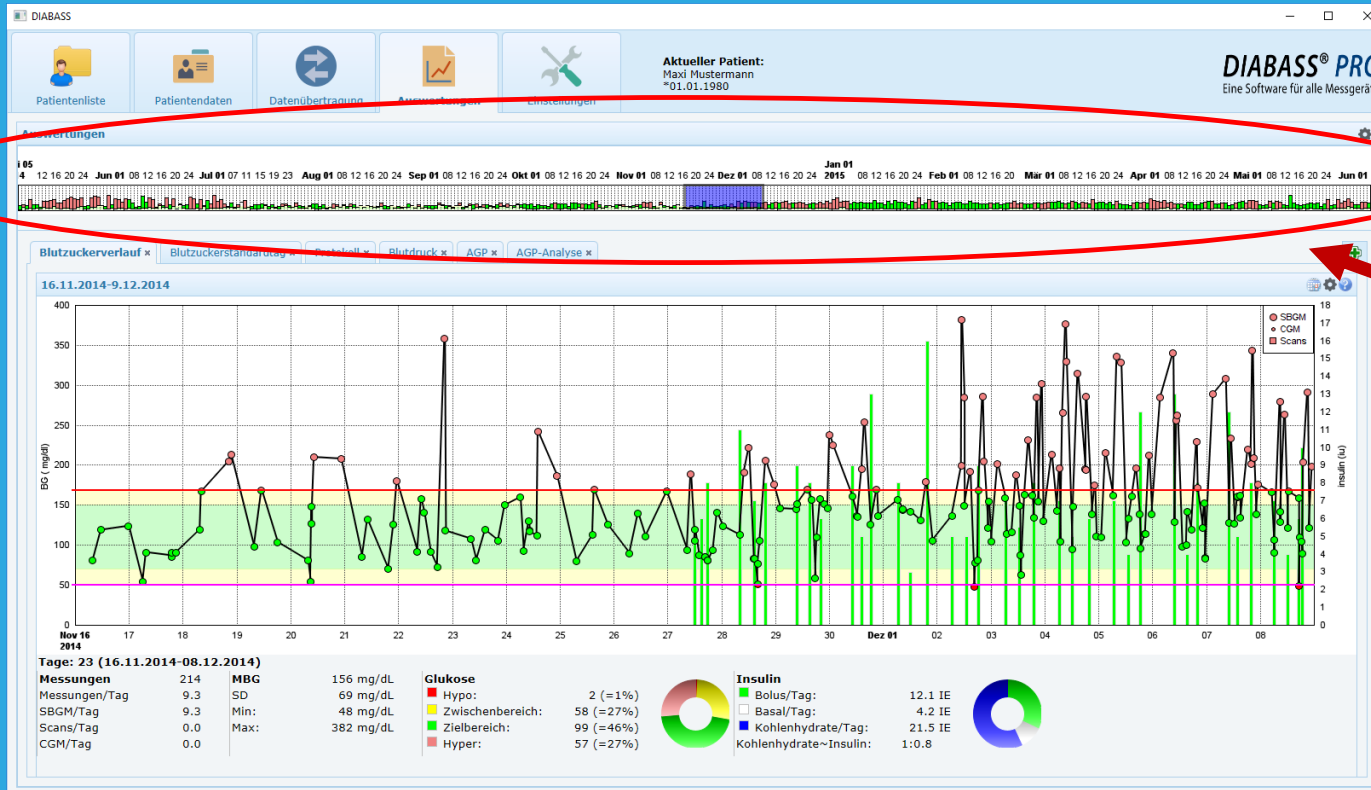


Komfortable Zeitleiste

Der Auswertungszeitraum kann nun bequem über eine Zeitleiste ausgewählt werden

Neue Version
verfügbar
ab Sommer 2018

DIABASS[®] PRO

Eine Software für alle Messgeräte

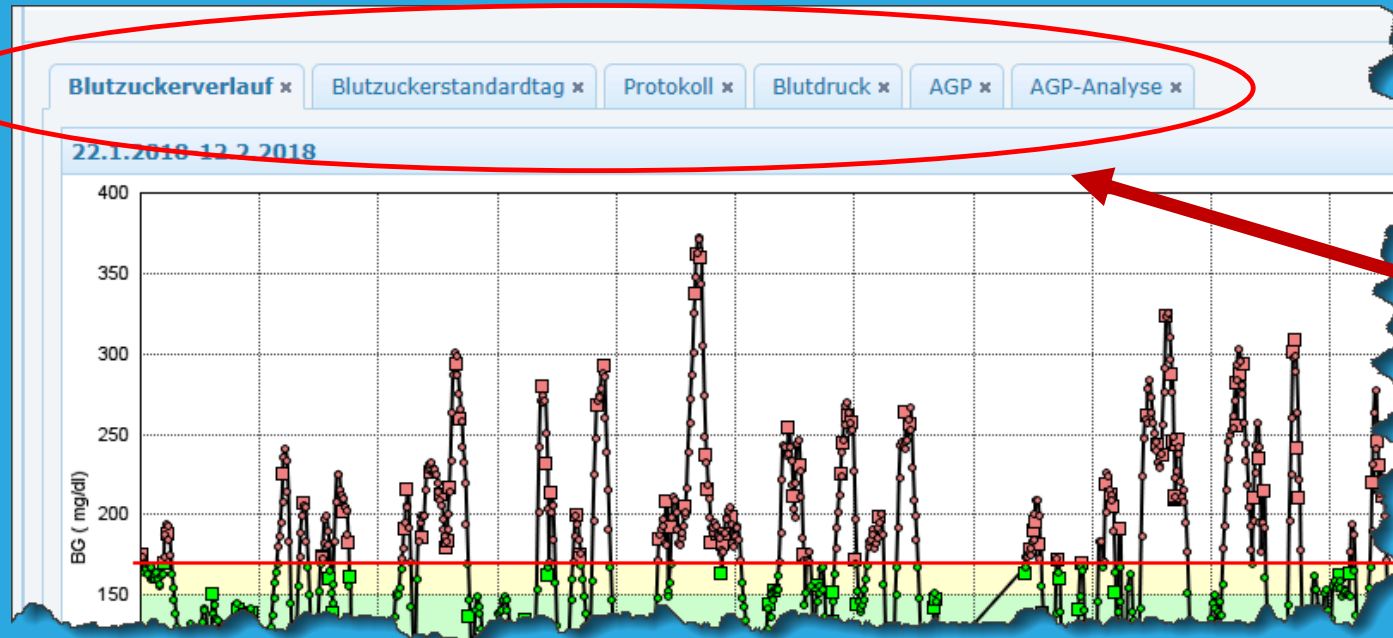


Schneller Wechsel zwischen Auswertungen

Mittels komfortabler Tabs kann schnell zwischen Auswertungen gewechselt werden

Neue Version
verfügbar
ab Sommer 2018

DIABASS[®] PRO

Eine Software für alle Messgeräte

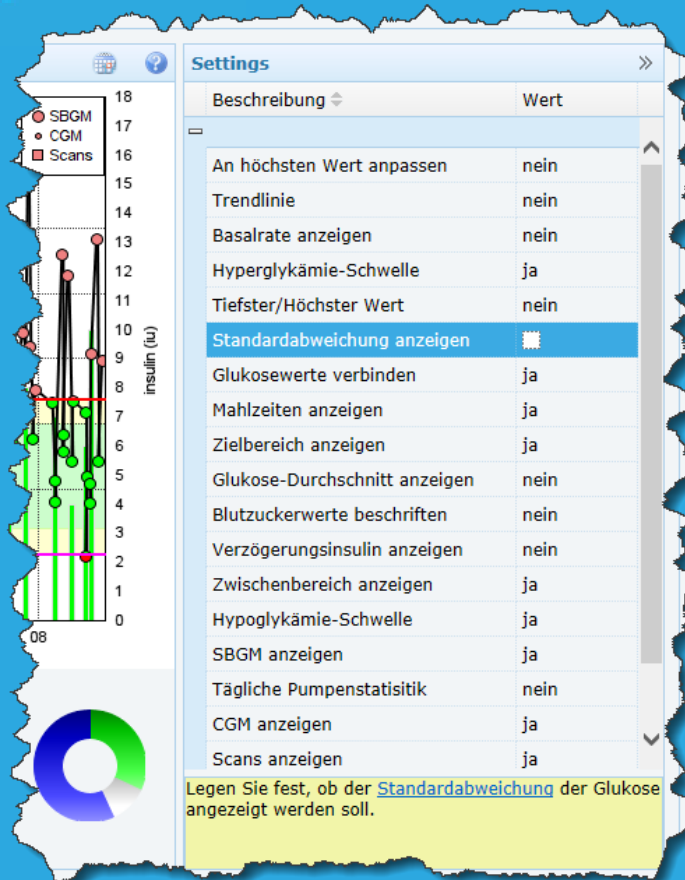


Individuell anpassbar

Das neue Eigenschaftsfenster ermöglicht eine komfortable Anpassung der Darstellung auf Mausklick

Neue Version
verfügbar
ab Sommer 2018

DIABASS[®] PRO
Eine Software für alle Messgeräte

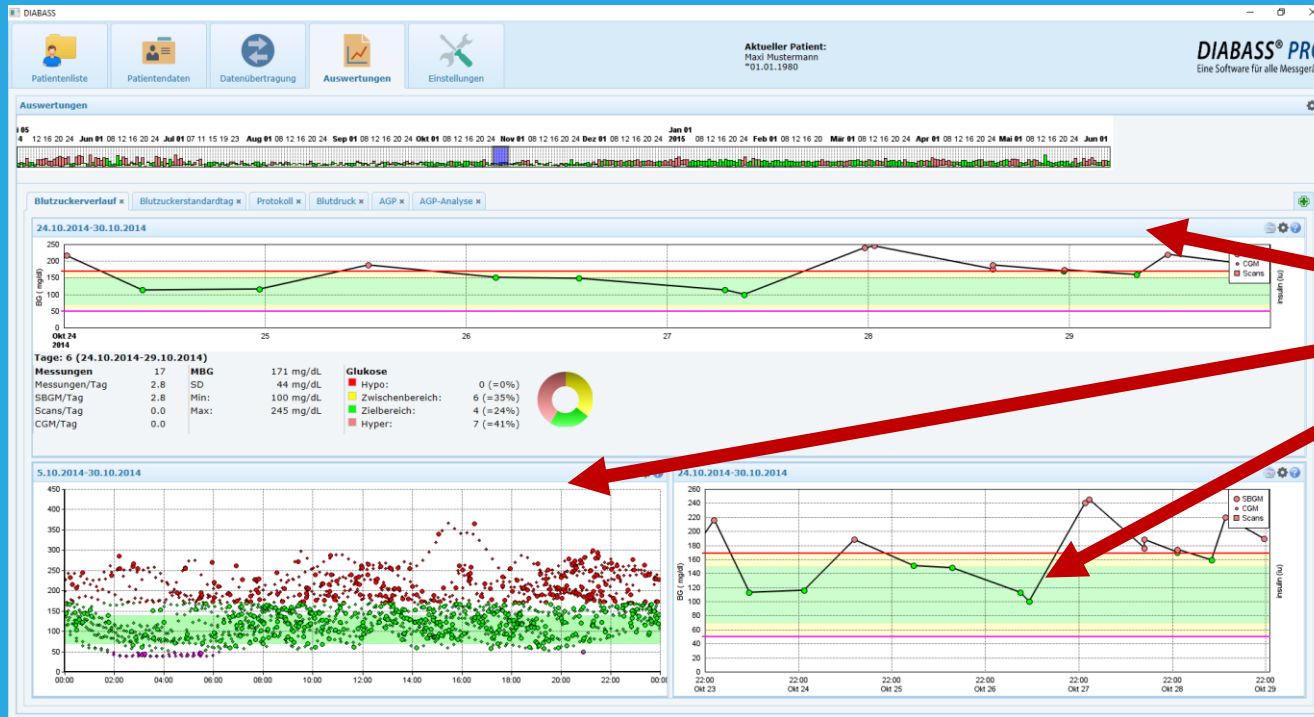

Zeitbereiche vergleichen

Wählen Sie zwischen verschiedenen
Bildschirmansordnungen, um
unterschiedliche Zeitbereiche komfortabel
zu vergleichen

Neue Version
verfügbar
ab Sommer 2018

DIABASS[®] PRO

Eine Software für alle Messgeräte

Offen & Herstellerunabhängig

Kompatibel mit allen gängigen Blutzuckermessgeräten, mit CGM/FGM, Insulinpumpen und Apps.

Keine Beeinflussung des Ordnungsverhaltens:

DIABASS[®] ist herstellerneutral und für alle Geräte offen: auch Systeme „kleinerer“ Anbieter werden unterstützt.



Neue Version
verfügbar
ab Sommer 2018



Offen & Herstellerunabhängig

Kompatibel mit allen gängigen Blutzuckermessgeräten, mit CGM/FGM, Insulinpumpen und Apps.

Datenübertragung aus allen gängigen Blutzuckermessgeräten, aus FGM/CGM und Insulinpumpen, aus Blutdruckmessgeräten und sonstigen Geräten (z. B. Schrittzähler).

Datenübernahme aus zahlreichen Apps und Fremdprogrammen – beispielsweise aus mySugr, Sidiary, Contour Diabetes App, Accu-Chek connect, DIA-mant, Carelink, ...

Keine Beeinflussung des Verordnungsverhaltens DIABASS® ist herstellerunabhängig: auch Systeme „kleinerer“ Anbieter werden unterstützt.

DIABASS[®] PRO

Eine Software für alle Messgeräte

DIABASS® ermöglicht das Auslesen der Daten aus Messgeräten/Insulinpumpen/CGM/FGM u. a. folgender Hersteller:



Neue Version
verfügbar
ab Sommer 2018


DIABASS[®] PRO

Eine Software für alle Messgeräte

Patientenliste | **Patientendaten** | **Datenübertragung** | **Auswertungen** | **Einstellungen** | **Aktueller Patient:** Maxi Mustermann *01.01.1980

Patientenliste | **Neu eingegangene Daten**

Sendedatum	Sender	Patient	Info
07.05.2018 13:23:05	DIABASS (info@diabass.de)	X X ⚠ Unbekannter Patient	Contour App Export Datensätze: 3
08.03.2018 23:59:41		Oliver2 Ebert	FreeStyle Libre Datensätze: 11324

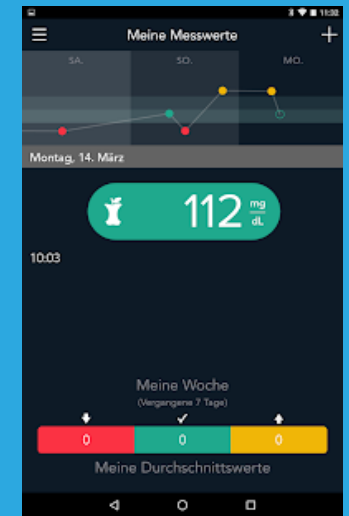

Direkte Datenübernahme aus Apps

Viele Patienten-Apps ermöglichen einen Datenversand per E-Mail. Mit DIABASS PRO können die Daten zahlreicher Apps automatisch abgerufen und übernommen werden.

Neue Version
verfügbar
ab Sommer 2018

DIABASS[®] PRO

Eine Software für alle Messgeräte

Umfassend & Integrativ

Übersichtliche Auswertungen (neu:
u.a. AGP, Hypo-Analyse, Basalrate...)

Telemedizin leicht gemacht:

Datenübernahme aus Apps,
Konnektivität mit Praxissoftware,
gluconet[®]-Anbindung.



Neue Version
verfügbar
ab Sommer 2018

DIABASS[®] PRO

Eine Software für alle Messgeräte

Datenschutz & Schweigepflicht

Alle Daten bleiben beim Arzt;
es werden keine Patientendaten
an Hersteller übermittelt.

Ohne die Risiken von Cloud-Lösungen:

Keine gesonderte Einwilligung und kein
Auftragsverarbeitungsvertrag (Art. 28
DSGVO) erforderlich.



Neue Version
verfügbar
ab Sommer 2018



Datenschutz & Schweigepflicht

Alle Daten bleiben lokal gespeichert, es werden keine Daten nach außerhalb übermittelt.

Ohne die Risiken von Cloud-Lösungen:

Keine gesonderte Einwilligung und kein Auftragsverarbeitungsvertrag (Art. 28 DSGVO) erforderlich

Im Gegensatz zu internetbasierten Softwarelösungen bleiben mit **DIABASS[®] PRO** alle Daten beim Arzt gespeichert. Sie müssen sich daher nicht um dezierte Datenschutzaufklärungen und regelmäßige Einwilligungserklärungen der Patienten kümmern.

Ohne die Risiken von Cloud-Lösungen:

Es müssen auch keine Verträge zur Auftragsverarbeitung geschlossen bzw. deren Einhaltung überwacht werden. (Art. 28 DSGVO)

Neue Version
verfügbar
ab Sommer 2018

Ab 25. Mai 2018 gelten die strengen Vorschriften der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). Die neuen Regelungen haben auch massive Auswirkungen auf das digitale Diabetes-Management. Solche Lösungen sind entweder als lokal speichernde Software oder als internetbasierte „Cloud“-Anwendung erhältlich. Die datenschutzrechtlichen Anforderungen unterscheiden sich erheblich:

DIABASS® PRO (lokale Anwendung)



*Alle Daten sind lokal gespeichert;
es werden keine Daten an Dritte übermittelt.*

- keine gesonderte Aufklärung erforderlich
- keine gesonderte Einwilligung erforderlich
- keine Anforderungen, die über ohnehin bestehende Datenschutzpflichten hinausgehen
- keine Gefahr der Strafbarkeit gem. § 203 StGB
- keine Internetverbindung erforderlich

- keine Abhängigkeit von Dritten

- einfache Erstellung/Wiederherstellung von Backups
- rechtskonforme Erfüllung der Archivierungs- und Dokumentationspflichten dank lokaler Verwahrung einfach möglich
- keine Notwendigkeit zur Datenauslagerung: selbst große Datenbestände „passen“ auf einen handelsüblichen USB-Stick*

* Beispielrechnung: 2000 Patienten mit CGM-Daten über 10 Jahre.
Speicherbedarf = ca. 30 – 50 GB

Webbasierte Anwendungen („Cloud“)



*Patientendaten werden an Gerätehersteller
bzw. Dritte übermittelt und dort gespeichert.
Diese können die Daten einsehen und (mit-)nutzen.*

- umfassende Aufklärung des Patienten erforderlich
- gesonderte Einwilligung der Patienten erforderlich
- Datenübermittlung muss notwendig und begründet sein (Datenminimierung, Art. 5 DSGVO)
- Gefahr der Strafbarkeit gem. § 203 StGB
- Datenschutz-Folgenabschätzung fast immer erforderlich (Art. 35 DSGVO)
- bei gestörter Internetverbindung/Erreichbarkeit :
kein Arbeiten möglich
- Erstellung/Wiederherstellung von Backups von
Anbieter abhängig und/oder zeitintensiv
- rechtskonforme Erfüllung der Archivierungs- und Dokumentationspflichten ist bei fremdgelagerten Daten nur schwer sicherzustellen
- potentielle Mithaftung bei Datenschutzverstößen des Anbieters
- Zuführung von Patientendaten an Hersteller ist
berufs- und wettbewerbsrechtlich problematisch
- nur schwer vereinbar mit den Empfehlungen der BÄK

Neue Version
verfügbar
ab Sommer 2018

DIABASS[®] PRO
Eine Software für alle Messgeräte

Die Vorteile sprechen für sich. **Bewährt seit über 20 Jahren!**



- ✓ **einfach**
Schnell erlernt und unkompliziert zu bedienen
- ✓ **kostensparend**
Einarbeitung, Installation und Wartung nur für eine einzige Software erforderlich
- ✓ **universell**
Datenübertragung aus allen gängigen Blutzuckermessgeräten, aus Blutdruckmessgeräten, Insulinpumpen und Apps
- ✓ **unabhängig**
Mit **DIABASS[®] PRO** begeben Sie sich in keine Abhängigkeit zu einem Gerätehersteller
- ✓ **umfassend**
Aussagekräftige und übersichtliche Auswertungen
- ✓ **netzwerktauglich**
Greifen Sie von allen Arbeitsplätzen auf eine gemeinsame Patientendatenbank zu
- ✓ **Datenschutz**
Alle Daten bleiben ausschließlich lokal gespeichert; es müssen keine Daten an Dritte übermittelt werden.
- ✓ **integrativ**
Verknüpfung mit der Patientenakte (per GDT/BDT)

DIABASS[®] PRO

Eine Software für alle Messgeräte

**Neue Version
verfügbar
ab Sommer 2018**