

První kroky s produktem DIABASS® PRO

Spusťte *DIABASS® PRO* přes symbol na desktopu

Seznam pacientů se automaticky zobrazí při spuštění, lze jej kdykoli vyvolat pomocí ikony "ADMINISTRACE" (A.

Dvojím kliknutím otevřete libovolného stávajícího pacienta v seznamu pacientů nebo založte pomocí příslušné ikony nového pacienta.

Otevře se sekce hodnocení, kde se zobrazí posledních 90 dní s evidovanými hodnotami. Tuto sekci lze později kdykoliv vyvolat pomocí ikony "ANALÝZA" **G**.





Pro načtení dat z měřicího přístroje klikněte na ikonu IMPORT ^(B), dvojím kliknutím zvolte požadované zařízení ze seznamu a následujte pokyny pro přenos dat. Mnohá zařízení jsou identifikována automaticky, pokud jsou propojena s PC

- 1 Přes komfortní výběrovou lištu lze pohodlně ohraničit požadované hodnocené období
- 2 Pomocí kartotékových záložek můžete přecházet mezi hodnoceními
- 3 Pomocí symbolu 🛞 lze otevřít nový kartotékový list
- 4 Pomocí symbolu 🧟 otevřete okno vlastností pro individuální úpravu zobrazení
- 5 Rovněž statistika je uspořádaná v přehledných kartotékových záložkách
- 6 Vždy přehledně zobrazena: průměrná hodnota cukru v krvi i vypočtená hodnota HbA1c za posledních 90 dní



QUICK GUIDE První kroky



Prvotní instalace na PC



Prvotní instalace DIABASS® PRO je absolutně snadná a rychlá. Nejsou zapotřebí žádné speciální počítačové znalosti.

Dvojím kliknutím spusťte soubor diabass6.exe, který jste obdrželi na CD nebo stáhli. DIABASS[®] PRO se pak instaluje zcela automaticky, vygeneruje symbol na desktopu a spustí se.

O Litera praitiens	Nás
Keine Lizenz gefunden	k ak
Es konnte kenne getige Luenz für dieses Produkt gefunden wenden. Ditte geben Sie einen Luendsey ein oder welten Sie eine Litenddete aus.	plat
	Zvo (pří obc stał OK.

ledně budete vyzváni ktivaci softwaru pomocí ného licenčního souboru.

olte prosím licenční soubor pona *.key), který jste drželi se softwarem nebo při hování a potvrďte tlačítkem

4	

Instalace v síti



Pokud chcete *DIABASS® PRO* používat v síti, je nutné založit adresář databáze, který mohou využívat všechna pracoviště. I zde probíhá instalace prakticky automaticky.

DIABASS* PRO watter all an an an and a state

Klikněte v DIABASS® PRO na

ikonu NASTAVENÍ

\subset	
-	_

0 Obieví se okno, v němž zvolíte

kartotékovou záložku "systém/ databáze" a zde pak kliknete na ZMĚNIT NASTAVENÍ

territri bashkanna bashka bal uti dan sarar The second secon Same Indentifiantly 1

Nyní se otevře okno pro systémová nastavení. Zde zvolte ikonu "Založit novou databázi pro přístup do sítě"

Následně můžete zvolit ve své lokální síti pracovní adresář, v němž chcete ukládat pacientská data.

Antonia and

-

tente te

-

Pokud chcete DIABASS® PRO používat pouze na jednom pracovišti (tzn. bez přístupu k síti), instalace je tím ukončena.

Můžete pak pokračovat krokem 3 (převzetí dat DIABASS°5) nebo krokem 4 (první kroky)

DŮLEŽITÉ: Zvolte prázdný adresář, který je identicky dostupný na všech pracovištích, resp. je zde pokud možno mapován se stejným písmenem jednotky (např. v:\daten\diabass)

Založení potřebné adresářové struktury trvá několik sekund. Pro další instalace v síti byl vytvořen předkonfigurovaný instalační soubor.





Převzetí dat z **DIABASS® PRO**

Pro převzetí pacientských dat z existuiící verzeDIABASS[®] PRO přejděte do okna systémových nastavení (srov. krok 2). Zde klikněte na ikonu "Asistent pro převzetí databáze DIABASS® PRO". Poté zvolte adresář s existujícím datovým souborem a spusťte převzetí dat pomocí tlačítka "OK".

V krátké době se data konvertují do nového formátu DIABASS® PRO.

DŮLEŽITÉ: Konverze nemá negativní vliv na stávající data. Data tedv můžete bez rizika "cvičně" převzít a až do definitivního přechodu na nový systém dále zpracovávat pomocí staré verze programu.

> Před definitivním přechodem by pak měly být ještě jednou převzaty nejaktuálnější soubory dat.