

# 4

## Erste Schritte mit DIABASS® PRO

DIABASS® PRO ist ein Produkt der mediaspects GmbH  
Postfach 10 07 31, D-72307 Balingen



Starten Sie **DIABASS® PRO** über das Symbol auf dem Desktop




Die **Patientenliste** wird automatisch beim Start angezeigt; sie kann später jederzeit über die Schaltfläche „**VERWALTUNG**“ **A** aufgerufen werden.

Öffnen Sie einen **vorhandenen Patienten** per Doppelklick aus der Patientenliste oder legen Sie einen neuen Patienten über die entsprechende Schaltfläche an.

Es öffnet sich dann der Auswertungsbereich, welcher die letzten 90 Tage mit erfassten Werten anzeigt. Dieser kann später jederzeit über die Schaltfläche „**ANALYSE**“ **C** aufgerufen werden.



**i** Um Daten aus einem Messgerät einzulesen, klicken Sie die Schaltfläche **IMPORT** **B**, wählen das gewünschte Gerät aus der Liste per Doppelklick aus und folgen den Anweisungen zur Datenübertragung. Viele Geräte werden automatisch erkannt, wenn diese mit dem PC verbunden werden

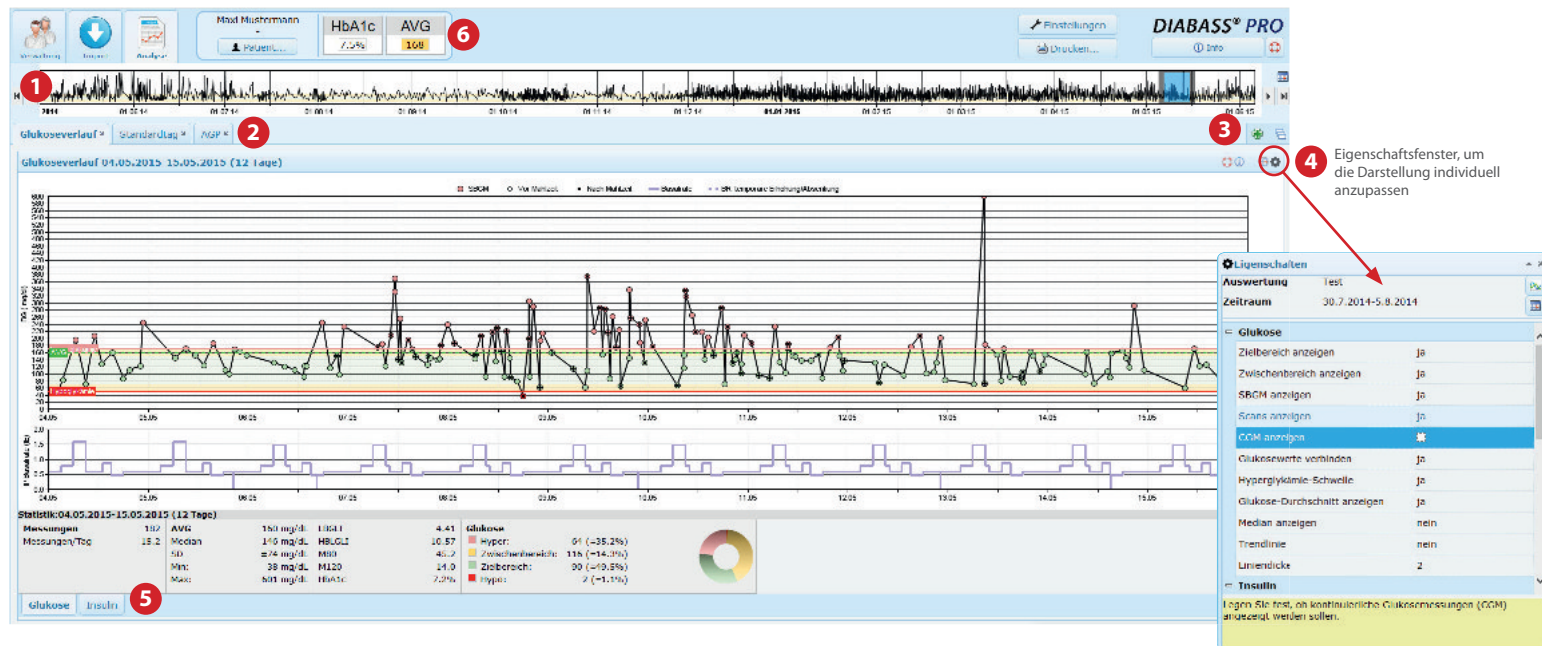

- 1 – Über die **komfortable Auswahlleiste** kann der gewünschte Auswertungszeitraum bequem eingegrenzt werden
- 2 – Wechseln Sie mittels **Karteikartenreitern** zwischen den Auswertungen
- 3 – Mit dem Symbol kann eine neue Karteikarte eröffnet werden
- 4 – Mit dem Symbol öffnen Sie ein Eigenschaftsfenster, um die Darstellung individuell anzupassen
- 5 – Auch die **Statistik** ist in übersichtlichen Karteikartenreitern angeordnet
- 6 – Immer im Blick: der **Blutzuckermittelwert** sowie der errechnete **HbA1c-Wert** der letzten 90 Tage

# DIABASS® PRO

Eine Software für alle Messgeräte

## QUICK GUIDE

### Erste Schritte




# 1

## Erstmalige Einrichtung auf einem PC



Die Einrichtung von **DIABASS® PRO** ist absolut einfach und in kurzer Zeit erledigt. Es sind hierfür keine besonderen PC-Kenntnisse erforderlich.

Starten Sie die auf CD oder per Download erhaltene Datei `diabass6.exe` per Doppelklick. **DIABASS® PRO** installiert sich dann vollkommen automatisch, richtet ein Symbol auf dem Desktop ein und startet.

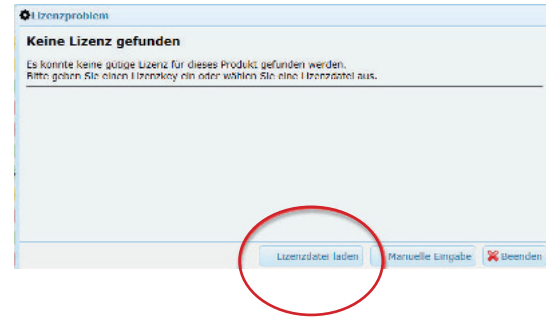

Anschließend werden Sie aufgefordert, die Software mit einer gültigen Lizenzdatei zu aktivieren.

Bitte wählen Sie hier die Lizenzdatei (Endung \*.key) aus, die sie zusammen mit der Software bzw. beim Download erhalten haben, und bestätigen dann mit OK.



**Sofern Sie **DIABASS® PRO** nur auf einem einzigen Arbeitsplatz (d. h. ohne Netzwerkzugriff) einsetzen wollen, ist die Einrichtung damit schon abgeschlossen.**

Sie können dann mit **Schritt 3** (Übernahme von **DIABASS®5** Daten) oder **Schritt 4** (Erste Schritte) weitermachen

# 2

## Einrichtung im Netzwerk




Wenn Sie **DIABASS® PRO** zur Nutzung im Netzwerk einsetzen möchten, dann muss ein von allen Arbeitsplätzen nutzbares Datenbankverzeichnis eingerichtet werden. Die Einrichtung verläuft auch hier weitgehend automatisch.



Klicken Sie in **DIABASS® PRO** auf die Schaltfläche **EINSTELLUNGEN**



Im erscheinenden Fenster wählen Sie den Karteikartenreiter „System/ Datenbank“ und klicken dort dann auf **EINSTELLUNGEN ÄNDERN**

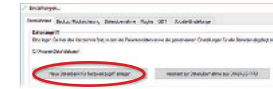

Es öffnet sich nun das Fenster für Systemeinstellungen. Wählen die dort die Schaltfläche „**Neue Datenbank für Netzwerkzugriff anlegen**“

Anschließend können Sie ein Arbeitsverzeichnis in Ihrem lokalen Netzwerk auswählen, in dem die Patientendaten abgelegt werden sollen.



**WICHTIG:** Wählen Sie ein leeres Verzeichnis, welches auf allen Arbeitsplätzen identisch erreichbar bzw. dort möglichst mit demselben Laufwerksbuchstaben gemappt ist (z. B. `y:\daten\diabass`)

Nach wenigen Sekunden ist die benötigte Verzeichnisstruktur angelegt. Für weitere Installationen im Netzwerk wurde eine vorkonfigurierte Einrichtungsdatei erzeugt.

# 3

## Daten von **DIABASS® PRO** übernehmen




Um die Patientendaten aus einer vorhandenen Version von **DIABASS® PRO** zu übernehmen, wechseln Sie in das Fenster für Systemeinstellungen (vgl. Schritt 2). Klicken Sie dort dann auf die Schaltfläche „**Assistent zur Datenbankübernahme DIABASS® PRO**“.

Wählen Sie dann ein Verzeichnis mit vorhandenem Datenbestand aus und starten die Datenübernahme mit „OK“.



**WICHTIG:** Die vorhandenen Daten werden durch die Konvertierung nicht beeinträchtigt. Sie können also gefahrlos „zum Üben“ die Daten übernehmen und bis zu einem endgültigen Umstieg mit der alten Programmversion weiterarbeiten.

Vor dem endgültigen Umstieg sollte dann nochmals eine Übernahme des aktuellsten Datenbestands erfolgen.

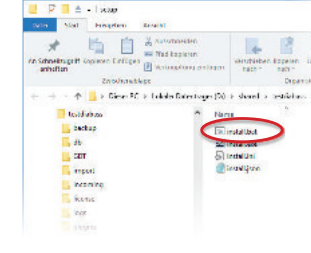

**Zur Installation auf den anderen Arbeitsplätzen im Netzwerk gehen Sie wie folgt vor:**

Wechseln Sie dort in das neu angelegte **DIABASS® PRO**-Verzeichnis auf dem Serverlaufwerk und öffnen den dortigen Unterordner „setup“, also beispielsweise `y:\daten\diabass\setup`. Klicken Sie dann einfach auf die Datei `install.bat` – nun wird **DIABASS® PRO** in wenigen Sekunden auf dem Arbeitsplatz eingerichtet. Wiederholen Sie dies dann auf allen weiteren Arbeitsplätzen, auf denen **DIABASS® PRO** genutzt werden soll.